

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ CASADA

Ортопедическая подушка под голову с эффектом памяти под голову принимает индивидуальную анатомическую форму головы спящего. Период привыкания к подушке отсутствует. Подушка с первого дня применения идеально поддерживает правильное положение головы во время сна, что гарантирует полноценный отдых взрослым и детям.



### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

- Выраженная S-образная форма обеспечивает оптимальную поддержку в области шеи.
- Особенно рекомендуется тем, кто страдает расстройствами сна и нарушением засыпания. Расслабленная позиция также помогает уменьшить храп и обеспечивает спокойный и благотворный сон.
- Материал подушки обладает ценным эффектом памяти и удерживает индивидуальный контур головы спящего до 3-5 секунд. Подушка «подстраивается» к положению спящего
- Подушка имеет 2 валика разной высоты (7 и 11 см). Достаточно повернуть подушку, чтобы отрегулировать необходимую высоту поддержки для головы и шеи



### ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Благодаря специальной, не загрязняющей окружающую среду технологии производства, в пеноматериале не образуются токсические вещества, в результате чего подушки из запенивающей пены являются прекрасным выбором для аллергиков. Тем не менее изделие необходимо регулярно проветривать для удаления влаги.

### ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Состав материала способствует уменьшению риска возгорания. Тем не менее, материал может воспламениться при прямом контакте с открытым пламенем. При горении материал выделяет вредные вещества. Поэтому настоятельно рекомендуем воздержаться от курения в постели.

### ЧИСТКА И УХОД

Саму подушку нельзя стирать. Для чистки изделия снимите чехол, проветрите материал подушки или тщательно протрите его хорошо отжатой тряпкой для удаления пятен или грязи, образовавшихся на поверхности. Чехол стирается при максимальной температуре 60°

### ГАРАНТИЯ

Гарантия 2 года. Гарантия на подушку распространяется на физические дефекты и изменения, которые приводят к образованию вдавленных участков размером более 2 см. Гарантия не распространяется на обычные изменения свойств жесткости или характеристики, которые не влияют на уменьшающие давления свойства изделия. Гарантия не действует в следующих случаях: загрязнение изделия или его негигиеническое состояние.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Casada GmbH  
Obermeiers Feld 3, 33104 Paderbon  
Germany  
Tel.: (+49)52 54 9 30 98 0  
www.casada.de  
info@casada.de

### ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ

ООО «Альфа Бизнес Кооперэйшн»  
142784, Московская область, дер. Румянцево  
Бизнес Парк «Румянцево», стр.2, оф. 412В  
Тел.: 8 800 250 10 20  
www.casada.ru  
info@casada.ru

